



RUSSI? STOP.

LA NUOVA
SOLUZIONE
PER SMETTERE
DI RUSSARE!

SISSEL®
SILENCIUM

UN MODO DAVVERO EFFICACE
PER RIDURRE IL RUSSAMENTO

WWW.SILENCIUM.IT



SISSEL® SILENCIUM® – LA SOLUZIONE INTERATTIVA CONTRO IL RUSSAMENTO.

Sono tranquillo e riposante in una nuova dimensione.

Dormire bene è fondamentale. Ma spesso non gli diamo la giusta importanza. Prendiamo il caso del russamento. Molti di noi pensano che sia poco più che un leggero fastidio con cui convivere serenamente. Invece il russare può pregiudicare il nostro stato di salute e quello di chi ci vive vicino. Non è solamente un tema di equilibrio psicologico.

Durante il sonno, gli eventi del giorno sono rielaborati, la crescita cellulare è stimolata, la rigenerazione del tessuto sono rafforzati ed è rin vigorito il sistema immunitario. Stanchezza giornaliera, irritabilità, problemi di concentrazione e un'efficienza limitata sono semplicemente le conseguenze più evidenti.

Nei casi in cui il russamento si accompagna a gravi apnee vi sono problemi di salute molto seri. Il tormento talora insopportabile che, russando, provochiamo a chi ci è vicino non è nulla in confronto a quello che provochiamo a noi stessi per ore e ore ogni notte.




I VANTAGGI

- Riduzione del russamento mediamente del 70%.*
- In alcuni casi la riduzione arriva fino al 95%.*
- Miglioramento della qualità di vita delle persone e del partner.
- Aumento della vitalità e della concentrazione.
- Maggiore tolleranza allo stress.
- Mantenimento di un sonno profondo.*
- Facilissimo da usare



*Risultato di un test sul campo in ambiente domestico

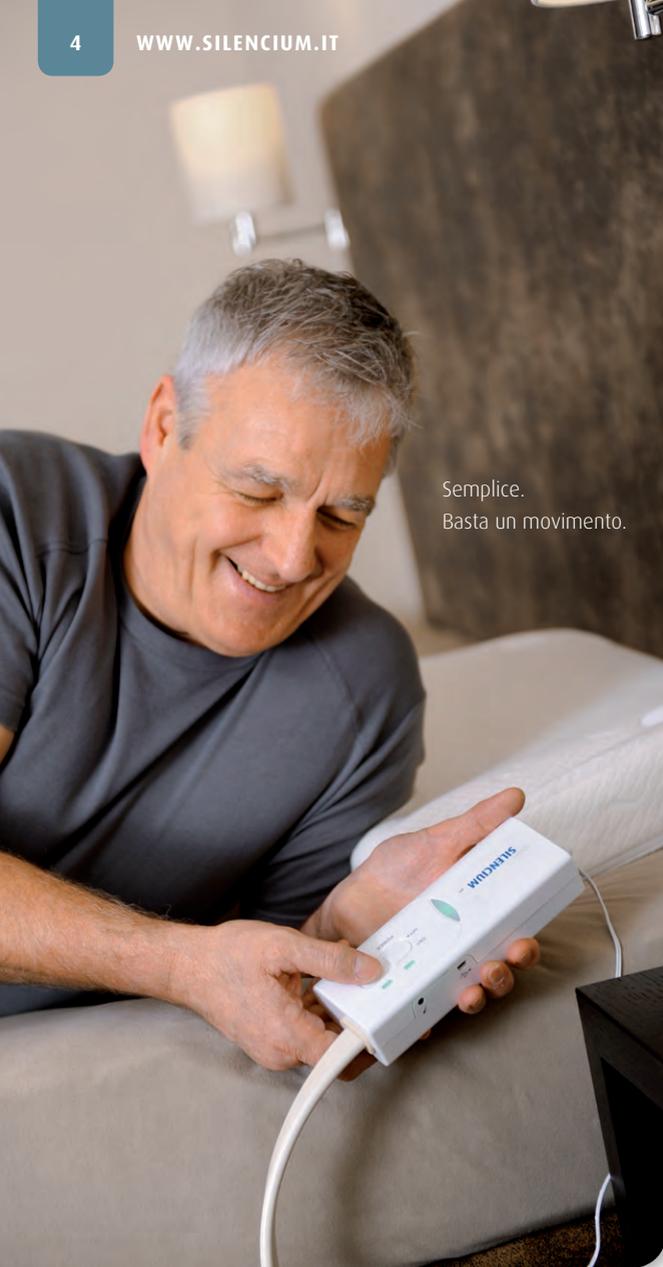

Semplice.
Basta un movimento.



COME FUNZIONA

Riposo notturno migliorato.

Senza farmaci o fastidiosi apparecchi anti-russamento.


Con la soluzione interattiva anti-russamento SISSEL® SILENCIUM® arriva finalmente un'innovazione unica al mondo, che rende più piacevole ai russatori e ai compagni disturbati il riposo notturno e, insieme, la vita.

SISSEL® SILENCIUM® registra continuamente i suoni del sonno e la posizione della testa. Non appena i microfoni integrati registrano un russamento, alcuni cuscinetti d'aria si gonfiano in base alla posizione della testa spostandola, dolcemente e in silenzio, in un'altra posizione.

Il cambiamento di posizione della testa aumenta la distanza tra la lingua e la gola, dilata così le vie respiratorie e riduce significativamente il russare. Se un primo movimento della testa non genera un effetto positivo apprezzabile, SISSEL® SILENCIUM® ruota ulteriormente la testa dolcemente e impercettibilmente, movimento dopo movimento: verso sinistra o a destra, su e giù. finché è interrotto il russamento o è individuata la posizione nella quale il russamento è ridotto al massimo.

Il risultato è verificabile e misurabile. Con l'aiuto di SISSEL® SILENCIUM® il russare si riduce in media del 70%*. Esso fornisce quindi una soluzione semplice ed efficace per un sonno profondo e ristoratore. Grazie a uno speciale programma per il personal computer è possibile inoltre registrare e valutare facilmente l'andamento del proprio russamento.

* Risultato di un test sul campo in ambiente domestico

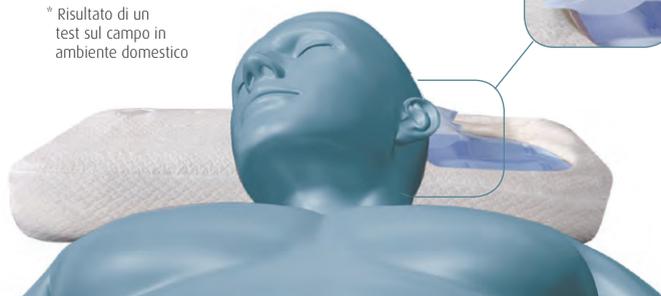



PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA

Caratteristiche di SISSEL® SILENCIUM®:


- struttura multi-strato nuova e rivoluzionaria
- tecnologia intelligente per un utilizzo pressoché silenzioso al 100%
- rivestimento esterno sfoderabile e lavabile per una facile manutenzione
- fodera interna traspirante e sciacquabile
- dimensioni 61 x 40 x 7/9 cm
- utilizzo a 6 V - testata la compatibilità elettromagnetica "EMC"
- soddisfa i requisiti della Direttiva 93/42/CE per i prodotti medicali

ADATTAMENTO

SISSEL® SILENCIUM® è un dispositivo medicale e necessita di una fase di adattamento. La piena confidenza al cambiamento della posizione abituale della testa e al cuscino anti-russamento può richiedere dai pochi giorni a 4 settimane. Il trattamento non va mai interrotto, servono costanza, pazienza e fiducia. Di notte in notte dormirete sempre più profondamente e tranquillamente.

COMPONENTI

- 1 Microfoni per la registrazione dei rumori legati al russamento.
- 2 Supporto viscoelastico per un maggiore comfort.
- 3 Superficie con sensori per il rilevamento della posizione della testa.
- 4 6 x 2 cuscinetti d'aria per lo spostamento della testa.
- 5 Inserto per la regolazione dell'altezza del cuscino.

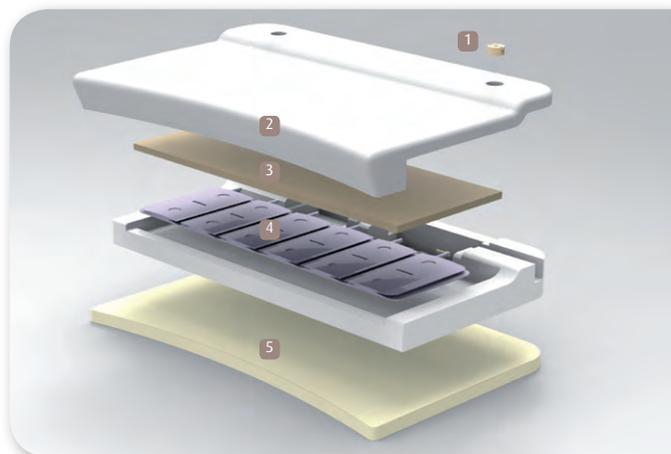



The natural way of Sweden

SISSEL® SILENCIUM®
Dormite sonni
tranquilli e riposanti,
così come dev'essere.

Lasciatevi consigliare da:

**CHIEDI
INFORMA-
ZIONI!**

CHIAMA 0438 63555
info@sissel.it www.silencium.it



Distribuito in Italia da:

Genesi Srl Via Conegliano 96 · 31058 Susegana (TV) · www.sissel.it
info@sissel.it · t 0438 63 555 · f 0438 455 607



Hersteller:

SISSEL® GmbH · Bruchstrasse 48 · D-67098 Bad Dürkheim · Germany
AC 11 V3 – distribuito in Italia da GENESI SRL

Soggetto ai termini e alle condizioni generali di garanzia.
Sono possibili cambiamenti di colore, materiali e design.